



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 11.12.2019

AVIZ
Nr. 2725BIO/02/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al Presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentelor nr. 637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în ședințele din datele de 07.12.2012, 18.03.2013, 27.09.2016, 07.12.2017, 17.07.2018 și 18.11.2019, s-a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

HYGIENIUM DEZINFECTANT UNIVERSAL MULTISUPRAFETE FARA CLOR

Alte denumiri comerciale, după caz

HYGIENEX DEZINFECTANT UNIVERSAL MULTISUPRAFETE FARA CLOR
FINE DEZINFECTANT UNIVERSAL MULTISUPRAFETE

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara, inclusiv punctul de lucru pentru producătorii din România)

Grande Gloria Production S.A., sat Costi, com. Vanatori, str. Tuluc, nr. 1, Hala nr. 68, Biroul nr. 2, jud. Galati, Romania

Punct de lucru: sat Costi, com. Vanatori, str. Tuluc, nr. 1, Hala nr. 68, Biroul nr. 2, jud. Galati

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

Grande Gloria Production S.A., sat Costi, com. Vanatori, str. Tuluc, nr. 1, Hala nr. 68, Biroul nr. 2, jud. Galati, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

| | |
|------------------------------|---|
| A. Grupa principală: | 1 |
| B. Tipul/Tipurile de produs: | 2 |

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

| Nr. crt. | Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau altele) | Nr. CE | Nr. CAS | Concentrația în unități metrice |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| 1. | Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorides | 269-919-4 | 68391-01-5 | 1,2% |
| 2. | Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides | 287-090-7 | 85409-23-0 | 1,2% |

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Lichid

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacoane cu capacitatea de 0,5L; 0,75L; 0,9L; 1L; 2,5L; 5L.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Domeniul de utilizare | Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale |
| B. Aria de aplicare | Dezinfectant pentru suprafețe și obiecte sanitare (robineti, dusuri, toalete). |

IX. EFICACITATE

| Activitate | Metoda de testare/ Protocol de testare | Specia/Tulpina | Concentrații | Timpi de acțiune |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Bactericida | SR EN ISO 1276 în condiții de curățenie (0,3g/l albumina bovina) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 | 100% (nediluat) | 30 minute |
| Bactericida | SR EN ISO 1276 în condiții de murdărire (3g/l albumina bovina) | <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 | 100% (nediluat) | 30 minute |
| Fungicida | ER EN 1650 în condiții de murdărire (3g/l albumina bovina) | <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404 | 100% (nediluat) | 30 minute |

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

| Metoda de aplicare | Concentrația soluției de lucru /doza de aplicare | Timpul de acțiune |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stergere cu ajutorul lavetelor/ bureților | Produs nediluat (100%) | 30 minute |

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme, simboluri și indicarea pericolului | - |
| Fraze de pericol (H) | - |
| Fraze de precauție (P) | P102–A nu se lasă la îndemâna copiilor. P301+P310–ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P305+P351+P338–ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P410+P412–A se protejează de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 5-25 °C |

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Populație.

XIII. RECOMANDĂRI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu există.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024. Avizul a fost rescris în data de 11.12.2019
Avizul conține – 2 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca