

Innocid ID-ic 40 PLUS

Detergent dezinfectant de nivel intermediar pentru instrumente și dispozitive medicale

- ✓ CONCENTRAȚII SCĂZUTE
- ✓ RAPORT AVANTAJOS CALITATE - PREȚ
- ✓ COMPATIBIL CU MAJORITATEA MATERIALELOR
- ✓ APROBAT DE KARL STORZ - ENDOSCOAPE
- ✓ EFECT BACTERICID, FUNGICID, MYCOBACTERICID, TUBERCULOCID ȘI VIRUCID
- ✓ TOXICITATE REDUSĂ, FĂRĂ RISC ASUPRA PERSONALULUI UTILIZATOR SAU MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
- ✓ NU ESTE INFLAMABIL
- ✓ NU ARE ACȚIUNE IRITANTĂ ASUPRA PIELII, CĂILOR RESPIRATORII, MUCOASEI OCULARE ȘI BUCALE ȘI NU NECESITĂ UTILIZARE ÎN ÎNCĂPERI CU VENTILAȚIE SPECIALĂ



DATE CHIMICE ALE INNOCID ID-ic 40 PLUS

Conține: didecilmetil polioxietil propionat de amoniu, Bis (3-aminopropil) dodecil amină

Aspect: lichid limpede

Miros: floral

CÂND SĂ FOLOSIȚI INNOCID ID-ic 40 PLUS ?

Folosii Innocid ID-ic 40 Plus pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor chirurgicale sau stomatologice, de orice tip, inclusiv endoscoape și dispozitive medicale. Nu necesită intervenția umană prin frecare a instrumentarului, după utilizare.

MOD DE UTILIZARE

1. Innocid ID-ic 40 Plus este un produs concentrat, care trebuie diluat înainte de a fi utilizat. Alegeți concentrația dorită.
2. Demontați instrumentele imediat după utilizare și introduceți-le în soluția pregătită de Innocid ID-ic 40 Plus.
3. Evitați formarea unor bule sau a unor goluri pentru a păstra efectul dezinfectant al soluției.
4. Lăsați instrumentele în soluție în funcție de timpul indicat de aplicare.

Schimbați soluția conform gradului de murdărie al acesteia, după maxim 24 de ore.

DATE MICROBIOLOGICE ALE INNOCID ID-ic 40 PLUS

Innocid ID-ic 40 Plus are efect bactericid, fungicid, mycobactericid, tuberculocid și virucid.

	0.5%	1%
Bacterii (incl. MRSA*)	5 minute	-
Fungi - candida	5 minute	-
TbB	30 de minute	-
Mycobacterii	-	60 de minute
Virusuri	5 minute	-

**Toate produsele dezinfectante Innocid acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează de MRSA (stafilococ auriu rezistent la metilina).*

INNOCID ID-ic 40 PLUS ESTE DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE FORME

REF	Produs unic
2001	1 litru
2002	5 litri



PRODUS ÎN GERMANIA